

Stand 08. September 2015 / Änderungen vorbehalten

CAD Parameter für 3shape - Kronen und Brücken

Material	Zement- spalt- Passungs- parameter	Zement- spalt- erweiterung Passungs- parameter	Wand- stärke	Fräser- radius- korrektur Bohrradius	Abstand zur Prä- perations- grenze	Rand- stärke	Rand- winkel
Glaskeramik	0,01	0,06	0,60	0,50	1,50	0,30	50
Zirkoniumdioxid white Zi opaque	0,01	0,06	0,50	0,50	1,00	0,30	65
Zirkoniumdioxid white ZiT translucent	0,01	0,06	0,50	0,50	1,00	0,30	65
Zirkoniumdioxid white ZiHT high translucent	0,01	0,06	0,50	0,50	1,00	0,30	65
CoCr (NEM)	0,02	0,07	0,30	0,50	0,50	0,10	70
Titan	0,02	0,07	0,40	0,50	0,50	0,10	70
PMMA	0,02	0,08	0,60	0,50	1,00	0,30	60
CAD&CAST	0,02	0,06	0,60	0,50	1,00	0,30	60
Hybrid- keramik	0,01	0,06	0,50	0,50	1,00	0,30	65

Alle Angaben in mm

Bitte erfragen Sie CAD Parameter anderer Systeme telefonisch unter 0800-520 4975.

